

Le specifiche tecniche

Dati tecnici	
Tensione di alimentazione	100/240 V - 50/60 Hz
Potenza nominale	30 W
Dimensioni esterne (LxAxP)	340 x 400 x 370 mm
Peso netto	Thalya 12,5 kg; Thalya PLUS 14,5 kg
Capacità serbatoio detergente (Solo Thalya PLUS)	0,4 litri (autonomia: fino a 40 cicli)
Capacità serbatoio disinfettante (Solo Thalya PLUS)	0,4 litri (autonomia: fino a 40 cicli)
Capacità lubrificante	Bomboletta da 200 a 500 ml
Pressione di esercizio	4-6 bar pressione di flusso
Consumo d'aria (MAX)	40 NI/min
Collegamento aria compressa	6 x 4

Adattatori disponibili*	Thalya	Thalya PLUS
Adattatore per manipoli micromotore Thalya	o	-
Adattatore per manipoli micromotore Thalya PLUS	-	o
Adattatore per turbine cefla	o	o
Adattatore per turbine Kavo® attacco MULTiflex®**	o	o
Adattatore per turbine Sirona®**	o	o
Adattatore per turbine W&H® attacco Roto Quick**	o	o
Adattatore per turbine NSK attacco PTL-CL-LED**	o	o
Adattatore per turbine Bien-Air® attacco Unifix®**	o	o
Adattatore Borden 2 vie**	o	o
Adattatore per detartatore cefla	-	o
Adattatore per detartatore Satelec Newtron**	-	o
Adattatore per detartatore Satelec Newtron LED**	-	o
Adattatore per detartatore EMS Piezon**	-	o
Adattatore per detartatore EMS Piezon LED**	-	o
Adattatore per manipoli micromotore con spray esterno	o	-
Adattatore per manipoli micromotore con spray esterno	-	o

* Verificare con il rivenditore l'adattatore adatto per i manipoli di altre marche.

o = disponibile

- = non disponibile

** Si segnala che i marchi identificativi dei prodotti non sono di titolarità di Cefla o di sue società collegate, e sono indicati a mero titolo descrittivo e funzionale alla destinazione d'uso del prodotto accessorio

Nota: la macchina viene venduta priva di adattatori.

THALYA CE

THALYA PLUS CE
0051



Making Your Life Better.

BU Medical Equipment
Sede legale ed amministrativa
Headquarters
 Cefla s.c.
 Via Selice Provinciale, 23/a
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653111
 fax +39 0542 653344

Stabilimento
Plant
 Via Bicocca, 14/c
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653441
 fax +39 0542 653601

12/2021 STPTIT211S01
 Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico.
 Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.



THALYA THALYA PLUS

L'igiene oltre la manutenzione



Making Your Life Better.

L'importanza della manutenzione di manipoli e turbine. Tra tutti, gli strumenti più critici.

Oltre ad essere i compagni di lavoro di ogni odontoiatra, questi strumenti rappresentano uno dei principali vettori di rischio legati alle contaminazioni crociate.

Quando uno di questi dispositivi rallenta la sua rotazione o si arresta, subisce un risucchio di liquidi all'interno dei condotti (retrosifonamento). E' quindi opportuno da parte dell'operatore procedere alla pulizia, disinfezione, lubrificazione e, infine sterilizzazione dopo ogni utilizzo. Tale procedura è fondamentale anche per preservare la qualità dello strumento, un manipolo non mantenuto nel modo corretto è spesso soggetto a rotture o degrado anticipato.



Fino a 4 strumenti contemporaneamente

Thalya & Thalya PLUS hanno la possibilità di trattare fino a 4 strumenti contemporaneamente:

- Turbine
- Manipoli micromotore
- Detartaratori (solo Thalya PLUS)

Sarà sufficiente l'adattatore dedicato per effettuare il trattamento. Thalya e Thalya PLUS sono state concepite per agevolare il lavoro dell'operatore. Gli attacchi possono ruotare di 45° facilitando le operazioni di montaggio e smontaggio degli strumenti.

Pulizia del mandrino

Tramite il relativo supporto sarà possibile trattare anche il mandrino rimuovendo ogni residuo di polvere e sporcizia presenti nella testa del manipolo.



Igiene del dispositivo

L'innovativo design e le caratteristiche della vasca di trattamento ne permettono una completa e perfetta igienizzazione. Estruendo lo sportello frontale ed il cassetto di raccolta liquidi, si potrà procedere alla completa pulizia della macchina.

Connettività

Thalya e Thalya PLUS sono dotate di WiFi integrato. Connesse alla rete potranno ricevere il servizio di assistenza tecnica da remoto Easy Check.


LA CORRETTA PROCEDURA DI TRATTAMENTO DI UNO STRUMENTO ROTANTE

PROTOCOLLO MANUALE



Ognuna delle fasi è fondamentale. Il protocollo è unico ma può essere effettuato in diversi modi:

PROTOCOLLO SEMI-AUTOMATICO

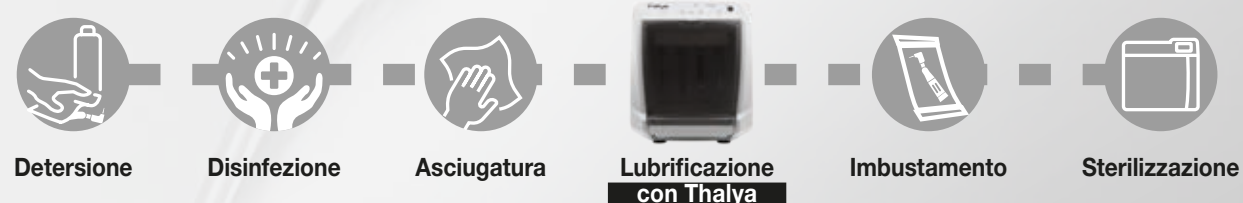

PROTOCOLLO AUTOMATICO*



Un protocollo automatico permette di ridurre i tempi aumentando la sicurezza degli operatori ed assicurando risultati costanti.

* Al fine di ottenere un risultato ottimale, prima di inserire lo strumento all'interno di Thalya PLUS è necessario procedere ad un trattamento manuale, come da indicazioni del produttore dello stesso.

Thalya. La manutenzione semplice

Thalya è la nuova alleata per la manutenzione degli strumenti rotanti. Semplice ed intuitiva, permette una perfetta manutenzione, tramite lubrificazione e spurgo, di turbine e manipoli. Sarà sufficiente collegare l'aria compressa e l'alimentazione elettrica per poter immediatamente utilizzare la macchina.



PROTOCOLLO SEMI-AUTOMATICO



Detersione



Disinfezione



Asciugatura



Lubrificazione con Thalya



Imbustamento



Sterilizzazione



Lubrificazione e spurgo di 4 strumenti in meno di un minuto

Il ciclo di Thalya è composto da tre fasi:

- Spurgo dei condotti
- Lubrificazione
- Spurgo dell'olio in eccesso

Il trattamento di 4 strumenti contemporaneamente, ha una durata totale di circa 55 secondi.




Alloggiamento universale per olio lubrificante

Thalya è predisposta per accogliere qualsiasi bomboletta di lubrificante (da 200 a 500 ml). L'operatore sarà libero di scegliere quello più adatto ai propri manipoli. Massima flessibilità per assicurare un risultato ottimale in ogni situazione.



Pulsantiera semplice ed intuitiva

La pulsantiera di controllo di Thalya permette un'interazione immediata con la macchina. L'operatore, ha la possibilità di personalizzare la durata delle fasi del ciclo.

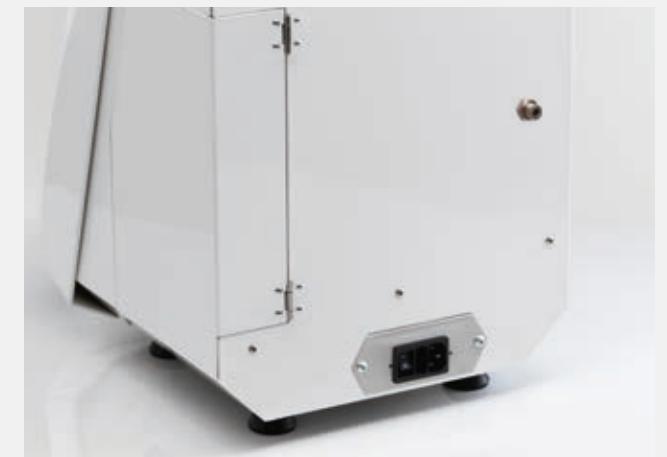

Plug & Play

Sarà sufficiente collegare la macchina all'aria compressa, alla corrente elettrica ed inserire la bomboletta di lubrificante per un utilizzo immediato.

Thalya plus. La manutenzione totale

Thalya PLUS nasce con l'obiettivo di automatizzare la manutenzione dei dispositivi rotanti. Detersione e disinfezione, lubrificazione, spurgo ed asciugatura in un unico ciclo.



PROTOCOLLO AUTOMATICO*



* Al fine di ottenere un risultato ottimale, prima di inserire lo strumento all'interno di Thalya PLUS è necessario procedere ad un trattamento manuale, come da indicazioni del produttore dello stesso.



Ciclo completo di 4 strumenti in 12 minuti

Il ciclo completo di Thalya PLUS è composto da 6 fasi:

- Spurgo dei condotti
- Detersione interna
- Disinfezione interna ed esterna
- Lubrificazione
- Spurgo dell'olio in eccesso
- Asciugatura.

Il trattamento di 4 strumenti contemporaneamente, ha una durata totale di circa 12 minuti.



Tracciabilità del ciclo

Grazie alla presa USB posta nella parte posteriore della macchina, l'operatore avrà la possibilità di scaricare i report ciclo della macchina. Strumento indispensabile per una corretta tracciabilità del processo di ricondizionamento.



Detergente & Disinfectante

Per un corretto utilizzo Thalya PLUS necessita di detergente e disinfectante. La macchina è dotata di due comodi serbatoi integrati posti sul lato destro del dispositivo. Controlla sul manuale utente i liquidi validati per Thalya PLUS.



Rotazione dei manipoli

Utilizzando lo specifico adattatore, anche i manipoli micromotore verranno messi in rotazione durante il trattamento, permettendo che detergente, disinfectante e lubrificante possano raggiungere tutti i punti dello strumento.